



**Fabricante:** IMPLASER 99 S.L.L.

Pol. Borao Norte, nave 5A Alfajarín, Zaragoza (España)

# FICHA TÉCNICA PANTALLA DE PROTECCIÓN



## DESCRIPCIÓN

Esta pantalla protectora se ha diseñado como complemento al equipo de protección personal para los profesionales de los distintos sectores que están haciendo frente al COVID-19. Se trata de un producto destinado, principalmente, a sanitarios, fuerzas del estado y personal de las residencias de ancianos.

Aunque no tienen homologación (dado que su diseño y fabricación se ha realizado para cubrir una necesidad urgente) y no pueden considerarse como parte de los EPIs de estos profesionales, estas pantallas protectoras actúan como una barrera al potencial contacto de las partículas que se proyectan al hablar o al toser. También limitan el riesgo de tocarnos los ojos y la boca tras entrar en contacto con una superficie potencialmente contaminada.

Estas pantallas, que protegen tanto al profesional que las utiliza como a los pacientes y ciudadanos con los que éste interactúa, se pueden desinfectar, alargando así su vida útil.



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Protección NO HOMOLOGADA para salpicaduras, consistente en:

- Ceñidor de frente de 800 x 30 mm multitalla, con un sistema de ranuras para ajuste.
- Separadores antivaho elaborados en foam de 25 x 25 x 15 mm, pegados al ceñidor de forma centrada.
- Máscara de plástico transparente de 300 micras, autoadhesiva y unida al ceñidor.



## MODO DE USO

Para utilizar esta pantalla de protección se deben seguir los siguientes pasos:

- Colocar la pantalla en la posición deseada, de forma que los separadores queden en la zona media de la frente y la cara quede totalmente cubierta por la pantalla.
- Aguantar el ceñidor por sus extremos con ambas manos y sujetar la pantalla a la cabeza, ajustando la medida final del ceñidor con ayuda del sistema de ranuras. La pantalla debe quedar totalmente ajustada, sin posibilidad de movimiento, para impedir que pueda interferir con el trabajo a realizar por el usuario con ella puesta.
- Desinfectar el producto tras su uso, para poder utilizarlo de nuevo y alargar así su vida útil.

